

Инструкция по получению и обработке образцов биоматериала из ротоглотки Порядок взятия биоматериала для исследований методом ПЦР

Время ожидания курьера: 15 минут.

За 3-4 часа до взятия мазков из ротоглотки (зева) не употреблять пищу, не пить, не чистить зубы, не полоскать рот/горло, не жевать жевательную резинку, не курить. Взятие мазков оптимально выполнять утром, сразу после ночного сна.

Проверьте маркировку на пакете и флаконе с транспортной средой ПЦР («Эппендорф»): на эппендорфе должны быть указана ваша фамилия и инициалы, номер заказа в соответствии с договором. На пакете должна быть наклеена этикетка с указанием ваших полных фамилии, имени, отчества, номером заказа.

Взятие биоматериала:

- Открыть упаковку со стерильным зондом (тип А).
- Пациент должен запрокинуть голову, постараться не двигаться во время взятия биоматериала.
- Взять зонд в правую руку, в левую взять шпатель.
- Прижать язык пациента к нижней части ротовой полости шпателем.
- Собрать материал, поочередно обрабатывая зондом правую миндалину, правую небную дужку, левую миндалину, левую небную дужку, язычок, на уровне язычка коснуться зондом задней стенки глотки (**Рисунок 30**). **При взятии пробы нельзя касаться тампоном слизистых щек, языка, десен, губ.**



- При наличии в полости рта очагов воспаления или изъязвления собрать материал из очагов.
- Перенести зонд во флакон с транспортной средой. Погрузив рабочую часть зонда в транспортную среду, вращать зонд в течение 10 секунд, избегая разбрызгивания раствора.
- **Не допускается оставлять наконечник зонда во флаконе!**
Вынуть зонд из раствора, прижимая его к стенке флакона и, отжав избыток жидкости, удалить зонд и плотно закрыть флакон.
- Поместить в гриппер-пакет.
- На пакете указать время и дату взятия материала на этикетке с ФИО пациента.

- Подпишите договор, информированное согласие.
- Сложите в пакет один экземпляр договора, информированное согласие, гриппер-пакет с биоматериалом.
- Передайте бесконтактно пакет курьеру.